

ANLEITUNG PCR-EINZELTESTUNG: MATERIALÜBERSICHT UND ABLAUFBESCHREIBUNG


MATERIALÜBERSICHT:



1 Lolli-Abstrichtupfer für Ihre Einzeltestung.



1 Barcode für die Probe (Lolli-Abstrichtupfer).

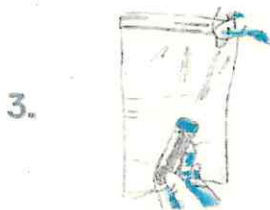

1 Plastiktüte für den Versand.



1 QR-Code für Ihre Registrierung und für die Befundabfrage – „Anmeldung & Befund“.

ABLAUFBESCHREIBUNG

Schritt 1: TESTUNG

1.



Sie führen den Test selbstständig (mit Ihrem Kind durch), indem Sie (bzw. Ihre Tochter/Ihr Sohn) 30 Sekunden auf dem Abstrichtupfer lutscht. Der Lolli-Abstrichtupfer (erkennbar an dem integrierten Röhrchen) wird nach dem Test fest verschlossen.

*Einzelstupfer darf nicht auf dem Boden gefallen sein. Darf nicht am Wattebausch angefasst werden.
Tupfer mit Wattebauschende nach unten in das Röhrchen.*

2.



Bitte bekleben Sie das (integrierte) Röhrchen senkrecht und zentral mit dem beigegefügteten Barcode „Probe-Einzeltestung“. Bitte verkleben Sie **nicht** den Verschluss.



3.



Legen Sie das (integrierte) Röhrchen für die Einzeltestung in eine Plastiktüte.

Schritt 2: REGISTRIERUNG IHRER PATIENTENDATEN

4.



Anmeldung & Befund
Einzeltestung
9955570048

LABUNIQ

Bitte entnehmen Sie die „Anleitung zur REGISTRIERUNG der PCR-EINZELTESTUNG“ und erfassen die Patientendaten und die QR-Code-No. im LABUNIQ-Portal.

Dieser Barcode dient auch der Befundabfrage.

Schritt 3: PROBE IN DIE SCHULE BRINGEN

5.



Nach erfolgreicher Erfassung der Patientendaten in LABUNIQ muss die Probe **bis spätestens 08:30 Uhr** am darauffolgenden Tag von Ihnen in die Schule gebracht werden. Bitte lassen Sie die Probe dem *sekretariat* Ihrer Schule zukommen.